

# EA922KB-8、-8A

## [病院用]衣類用塩素系漂白剤

液体塩素系漂白剤



### 除菌・除臭・漂白 幅広い用途に



- ・病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
- ・医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
- ・6%次亜塩素酸ナトリウム溶液だからさまざまな用途に合わせ、希釈して使用できます。

| 品番         | 入数 |
|------------|----|
| EA922KB-8  | 1個 |
| EA922KB-8A | 3個 |

### ●仕様

- ・ハイター
- ・衣類用
- ・内容量...5kg
- ・液性...アルカリ性
- ・成分...次亜塩素酸ナトリウム6%、水酸化ナトリウム
- ・つぶせる容器
- ・使えるもの...ガラス製品、プラスチック製品、白物の繊維製品(木綿、麻、ポリエステル、アクリル、レーヨン、キュブラ)、陶器、木・竹製品
- ・使えないもの...金属製の容器・用具、毛・絹・ナイロン、アセテート及びポリウレタンの繊維製品、色物・柄物の繊維製品、一部の樹脂加工された繊維製品、漆器、メラミン食器、獣毛のはけ

### 使用法の例

|   |   |
|---|---|
| <p>白衣についた血液、体液<br/>汗の漂白・除菌</p>     |  <p>本剤の100倍希釈液<br/>(血液が付いている場合50倍)<br/>を洗たく用洗剤と一緒に<br/>洗たく機に入れて洗う。</p> |
| <p>医療器具(ガラス、プラスチック)の洗浄、除菌</p>      |  <p>本剤の300倍希釈液に30分位浸し、水ですすぐ。</p>  |
| <p>哺乳びんなど、その他食器の<br/>漂白・除菌・除臭</p>  |  <p>本剤の100倍希釈液に30分位浸し水ですすぐ。</p>   |